

ACRIFLUX®

GERADOR DE FLUXO PARA TÉCNICAS DE CPAP


USO INDIVIDUAL



INSTRUÇÕES PARA USO DO ACRIFLUX®CPAP

- Insira a ponta da extensão **amarela** no orifício existente na parte superior do ACRIFLUX®CPAP e em seguida conecte essa extensão ao fluxômetro de ar comprimido convencional de 15 l/min.
- Insira a ponta da extensão **verde** no orifício existente no terminal da alça de silicone e em seguida conecte essa extensão ao fluxômetro de oxigênio convencional de 15 l/min.
- Conecte a traquéia corrugada ao tubo existente na parte inferior do ACRIFLUX®CPAP e em seguida ajuste-a à máscara de contato com o paciente.
- Libere o fluxômetro o suficiente para gerar fluxo e em seguida adapte a máscara ao paciente ajustando cuidadosamente a válvula de PEEP.

Obs: O Acriflux só pode ser operado por profissionais de saúde habilitados que possuam conhecimento pleno das suas indicações e contra-indicações técnicas.

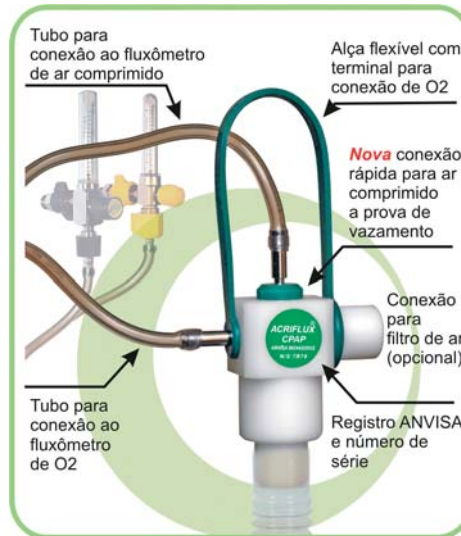

IMPORTANTE:

Observe que o ACRIFLUX®CPAP contém na parte posterior uma etiqueta que aponta detalhes a serem seguidos para maior segurança no procedimento de CPAP:

△ A seta apontada para cima (Ar) indica onde o pino da extensão de ar comprimido deverá ser inserido para gerar fluxo;

◁ A seta apontada para a esquerda (O₂) indica onde o pino da extensão de oxigênio deverá ser inserido para oferta de FiO₂;

▷ A seta apontada para a direita (Filtro) indica a posição para conexão do filtro de barreira (opcional);

▽ A seta apontada para baixo identifica onde será ajustada a traquéia que se conecta à máscara apropriada de CPAP que será ofertada ao paciente.

Esta embalagem contém:

Quantidade	Componente
01	ACRIFLUX® CPAP
01	Extensão para conexão ao fluxômetro de ar comprimido (amarelo)
01	Extensão para conexão ao fluxômetro de oxigênio (verde)

Atenção: O único seguimento gerador de CPAP é o que corresponde ao fluxômetro de ar comprimido.

Opcionalmente poderá ser usada a conexão do fluxômetro de oxigênio inserida na entrada superior do ACRIFLUX® CPAP para gerar CPAP

ANVISA / RMS nº 80244300002

Resp. Técnico: Dra. Marilda Fonseca - CRF/MG 7258

Fabr.: Murenas Ltda - CNPJ: 00.968.825/0001-59

Patente INPI nº 823344371

Distribuição: Criticalmed Sono e Saúde

Rua Felipe Camarão 139 - Vila Isabel - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20511-010

Tel.: (21) 2288-5517 - Fax: (21) 2278-4339

criticalmed@criticalmed.com.br www.criticalmed.com.br